



# STARTEN MET SAMMIE

*“Kunnen starten met een communicatie-hulpmiddel zonder dat dit nieuwe hulpmiddel teveel energie en tijd kost”*

Bij TouchToTell willen we dit zo eenvoudig mogelijk maken. **In deze flyer leest u** hoe u snel een **eigen profiel aanmaakt** en personaliseert naar de **behoefte van uw kind of uw cliënt** en zijn/haar omgeving.

 **@touchtotell**  
 Esther Smolders

Meer informatie   
[www.touchtotell.com](http://www.touchtotell.com)

*Uitgebreide  
info op de  
website*



# Installatie

Om te starten met TouchToTell **downloadt u eerst de lite-versie** van de app **in de App Store** op uw iPad. U maakt vervolgens een profiel aan. Als u gebruik wilt maken van de volledige versie **activeert u dit profiel met een persoonlijke licentiecode die u van ons ontvangt**. Daarna kunt u direct aan de slag met samen praten. Het is belangrijk om tijdens het aanmaken van een profiel ook direct een passende kinderstem of een volwassen stem te kiezen zodat zelf inspreken alleen hoeft wanneer u dat wilt.



Scan deze code met uw camera voor directe toegang tot de stapsgewijze handleidingen

## Handleiding

Op onze **website** vindt u **korte handleidingen** over alle functies en een **stap-voor-stap uitleg per functie** vanaf het begin.

Daar leest u ook hoe u de stem kunt instellen, hoe u foto's of zinnen toevoegt, eigen categorieën en oefeningen samenstelt en hoe u TouchToTell persoonlijk maakt.

### Wilt u liever dat iemand helpt bij het installeren of instellen?

Dan kunt u bij ons of bij rdgKompagne terecht voor ondersteuning en aanvraag tot vergoeding.



## Start met een kant en klaar Sammie profiel

Wanneer u start met Sammie staan er al een aantal categorieën klaar. Zo begint u met categorieën over uitingen, dingen, gevoelens, zorg en meer. Als dit basisprofiel te ingewikkeld is kunt u ook een eenvoudiger profiel inladen. In dit profiel ligt de focus op woordniveau en grote afbeeldingen in plaats van het maken van complete zinnestelsels. Dit profiel op niveau 1 is speciaal gemaakt, in samenwerking met rdgKompagne, voor het jonge kind ter kennismaking. U kunt van dit profiel gebruik maken met behulp van de functie '**profiel inladen**'. U vult dan een **code** in, in de TouchToTell-app en het profiel staat meteen voor u klaar! U kunt ook kant en klare categorieën, woordwebben en handelingsscripts toevoegen. **Zie [www.touchtotell.com/sammie](http://www.touchtotell.com/sammie)**

### Eenvoudige overgang van kind- naar volwassenlijn

Bij TouchToTell begrijpen we dat ondersteunde communicatie met de gebruiker mee moet kunnen groeien, zonder complicaties. **Daarom kunt u binnen de TouchToTell app altijd gebruik maken van zowel de kinder- als de volwassenlijn.**

